

JIVE® UP

Nueva silla eléctrica
Jive con bipedestación

ASCIENDE A UNA NUEVA DIMENSIÓN CON **JIVE UP**

Descubre la nueva silla eléctrica Quickie Jive UP. Combinando las ventajas de maniobrabilidad y rendimiento de la JIVE M con tracción central pero con un asiento multiposición, que te permitirá adoptar la postura que necesites en cada momento.

Con sólo pulsar un botón, podrás incorporarte y observar el mundo desde otra perspectiva, y disfrutar de todos los beneficios clínicos y sociales que ofrece la bipedestación.

Además podrás adoptar fácilmente en tu silla otras posiciones de asiento como relax, transferencia... Todo ello con la libertad e independencia que sólo Jive Up puede ofrecerte.

Déjate sorprender por la nueva Quickie JIVE UP!





BENEFICIOS DE LA BIPEDESTACIÓN

Las ventajas de adoptar regularmente una posición bipedestadora con JIVE UP son muy numerosas:

- Alivia la presión de la zona isquiática, previniendo la aparición de úlceras por presión en esa zona. Esto es importante sobre todo, en personas que no pueden realizar cambios de peso o tienen que permanecer mucho tiempo sentadas.
- Mejora tu funcionalidad en el trabajo, estudio o en tus actividades diarias para que puedas participar más activamente y disfrutes de una mayor integración.
- Proporciona una mayor amplitud de movimientos, y reduce el riesgo de contracturas musculares.
- Favorece la función de órganos vitales: facilita la respiración permitiendo que los pulmones se expandan en su totalidad, mejora el drenaje urinario, el tránsito intestinal y la digestión, y activa la presión sanguínea mejorando la circulación.
- Contribuye a la salud de los huesos, reduciendo el riesgo de aparición de enfermedades como la osteoporosis.
- Reduce el tono muscular y la espasticidad

Disfruta de los beneficios de un centro de rehabilitación desde la comodidad de tu hogar con la nueva Jive Up

ELIGE TU POSICIÓN DE ASIENTO...

Equipada con una completa configuración de opciones eléctricas, la silla eléctrica JIVE UP permite distintas posiciones de asiento. Podrás seleccionar cualquiera de ellas directamente moviendo el joystick del mando, o bien más fácilmente a través de la caja de control opcional (disponible con botones o interruptores). Todas ellas permiten pasar de una a otra sin volver a la posición inicial y además pueden reprogramarse para ajustar los parámetros según tus preferencias.

→ CAJA DE CONTROL DE LAS FUNCIONES DE ASIENTO CON BOTONES (opcional)

Para modificar la posición de asiento, presiona el botón que hay justo debajo de cada icono.



Bipedestación



Relax



Acostado



Transferencia



Posición libre (programable)

Podrás volver a la posición inicial de sentado simplemente presionando el segundo botón debajo de cada icono.



OPCIONES ELÉCTRICAS DE SERIE

- Módulo de bipedestación eléctrico
- Respaldo reclinable eléctrico de 0 a 85°
- Elevación eléctrica de asiento, 20 cm
- Reposapiés elevables eléctricos
- Basculación eléctrica de asiento (-10 a 22°)

UNA POSICIÓN PARA CADA MOMENTO

Equipada de serie con el mando R-net con pantalla a color que permite controlar hasta 6 opciones eléctricas y botones asignables y personalizables para las funciones que más utilices.

Si lo que quieres es estar siempre conectado, actualizar tus perfiles y tweets tienes un módulo Bluetooth opcional para controlar tu smartphone o tablet.

Encender la tele, apagar las luces, subir el volumen... todo lo puedes controlar desde tu mando si lo equipas con la pantalla Omni. Y si el manejo desde el joystick no resulta adecuado, también puedes disponer de una amplia variedad de mandos especiales.

→ POSICIÓN DE RELAX

Con el respaldo reclinado, el asiento basculado y los reposapiés elevados.



→ TRANSFERENCIA

Con el asiento ligeramente basculado hacia delante, para facilitar tus transferencias desde o hacia la silla.



Iconos de la caja de control opcional



→ BIPEDESTACIÓN

La silla eléctricamente te pondrá en posición vertical en cuestión de segundos.

→ ACOSTADO

Esta opción permite reclinarse completamente el respaldo hasta una posición horizontal (180°) para una posición de descanso total.



→ SENTADO

Es la posición de inicio desde la cual podrás conducir tu silla. Podrás regresar a ella desde el propio joystick o con los botones de la caja de control opcional.



TECNOLOGÍA SPIDER TRAC® TRACCIÓN CENTRAL

Conducción suave, segura y confortable sobre cualquier terreno. El innovador sistema de suspensión Spider Trac® lleva la comodidad y seguridad en la conducción a un nivel desconocido.



→ Observa en este vídeo cómo trabaja el sistema de suspensión SpiderTrac®!





¿CÓMO FUNCIONA SPIDER TRAC®?

La suspensión de gas **amortigua el impacto de los movimientos** producidos al conducir la silla sobre terrenos irregulares, de forma que esos impactos no se transmiten al usuario, ofreciéndote una **conducción más suave y muy comfortable**.

La conexión entre las ruedas traseras y delanteras permite más de 10 cm de movimiento para adaptarse a los cambios del terreno **sin que el asiento apenas cambie de posición**. Así, cuando las ruedas delanteras descienden un bordillo, las traseras giran hacia abajo para mantener el contacto con el suelo. Esto activa el gas en el cilindro de suspensión, amortiguando el impacto y **evitando el balanceo hacia delante**.

La conexión entre las ruedas traseras y delanteras provoca un movimiento descendente de la rueda central. Así se evita que la rueda de tracción llegue a perder el contacto con el suelo al cambiar de pendiente (por ejemplo al subir o bajar rampas desde el coche). De esta forma se garantiza la **máxima tracción de la silla**.

Tienes que probarlo para poder creerlo!!

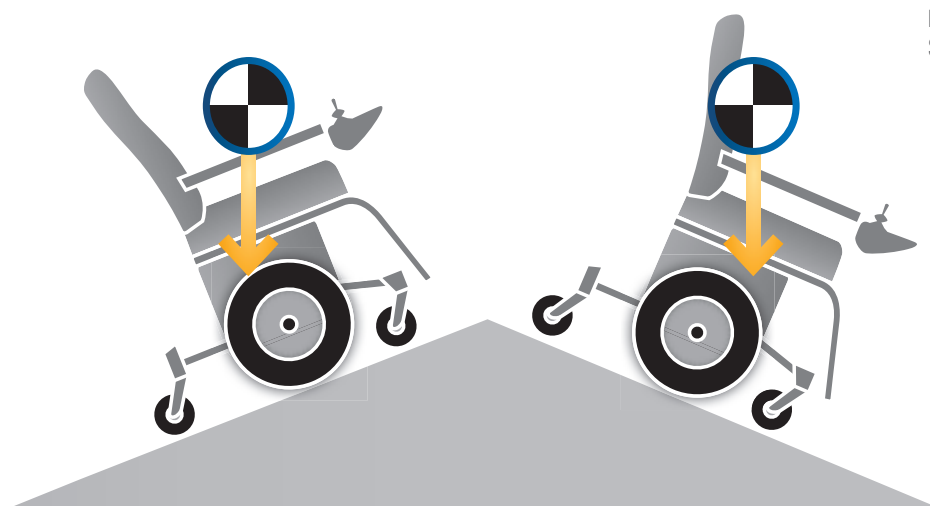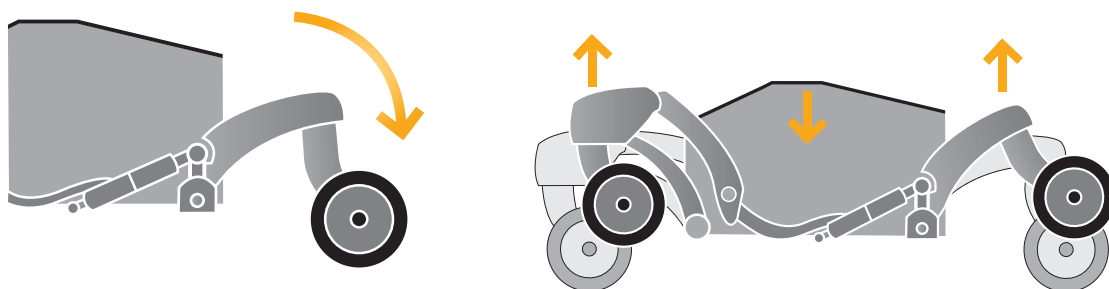


Movimientos de la suspensión Spider Trac en la tracción central

CONDUCCIÓN MUY SENCILLA E INTUITIVA

Al tener la tracción en la rueda central, el eje de giro de la silla coincide con el del propio usuario, por lo que los movimientos de la silla son más fáciles de calcular e intuir. Esto la convierte en una silla ideal para personas con capacidades limitadas para el control y manejo de sillas eléctricas, o con poco control de miembros superiores.

Además, el hecho de que todo el peso se concentre sobre la rueda central hace que se mejore significativamente la tracción.

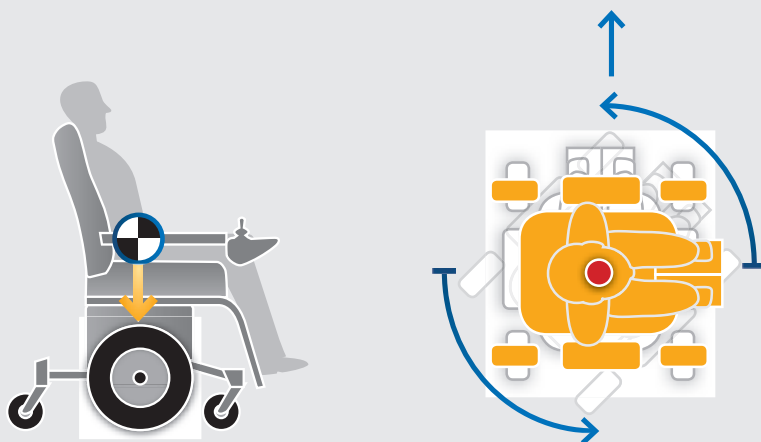

MANIOBRABILIDAD EN INTERIORES

Gracias a la tracción central, **la silla gira prácticamente sobre su propio eje**, en un radio muy reducido. De esta manera se consigue una excelente maniobrabilidad en espacios interiores y entre el mobiliario.

Las **dimensiones compactas** de la base permiten **fácil acceso en ascensores**, a través de puertas, pasillos etc, mientras que la reducida altura de asiento al suelo (sólo 43 cm con módulo de basculación) favorece el acceso a mesas.

Además el diseño de la silla permite un ángulo de 90° en caderas y rodillas, asegurando un **correcto posicionamiento de las piernas**.



GRAN RENDIMIENTO EN EXTERIORES

Con JIVE UP te sentirás como en casa en cualquier parte ya que podrás disfrutar de una **conducción suave y confortable** incluso en las superficies más irregulares. Su sistema de suspensión Spider Trac proporciona máxima tracción en cualquier terreno, excelente estabilidad y seguridad con capacidad para superar obstáculos de hasta 10 cm.

Sus **potentes motores de 10 km/h** (13 km/h opcionales) y baterías de 80 Amp (60 Amp opcionales) aseguran una conducción increíble durante mucho tiempo. Y además, con una gran variedad de sistemas de control, para encontrar el más adecuado a tus necesidades.

JIVE® UP

APROBADA PARA EL TRANSPORTE EN **VEHÍCULOS**

Jive Up ha superado con éxito las pruebas de colisión conforme a la normativa ISO 7176-19 que la acreditan para ser utilizada como asiento seguro durante el transporte en un vehículo. Las pruebas han sido realizadas con un sistema de retención de 4 puntos.



Configura la silla según tus necesidades especiales – JIVE UP permite seleccionar entre múltiples opciones. Si quieres ver la gama completa de accesorios disponible, consulta la hoja de pedido.



// ASIENTOS JAY COMFORT

El sistema de asiento standard es JAY Comfort, una gama de cojines y respaldos anatómicos que ofrece gran comodidad.



// RESPALDO RECLINABLE ANTIFRICCIÓN DE SERIE

Al reclinar, el respaldo se desliza por unos carriles compensando el movimiento del armazón, siguiendo el movimiento de la espalda y evitando así el roce.



// REPOSAPIÉS ELEVABLES ELÉCTRICOS DE SERIE

Ajustables en longitud y ángulo y con soporte de rodillas integrado para una sujeción más segura y efectiva de la pierna durante la bipedestación



// FÁCIL MANTENIMIENTO

Sistema de bloqueo automático del asiento para acceder cómodamente a las baterías y componentes electrónicos de la base.



// LUCES DE LED E INDICADORES (OPCIÓN)

Déjate ver con JIVE UP! Selecciona la opción de luces de LED e indicadores, integrados en la carcasa para una visibilidad mayor y con un estilo deportivo.




// POTENTE MOTOR DE 4 POLOS




Jive Up viene siempre equipada con un potente motor de 4 polos. Disponible con velocidad de 10 Km/h (opcionales 13 Km/h y 6 Km/h).




Especificaciones técnicas:

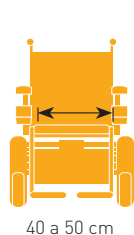


40 a 50 cm

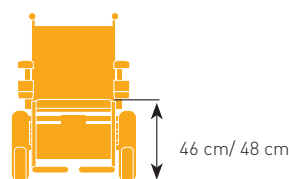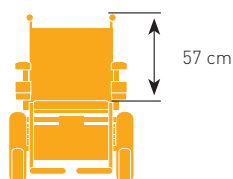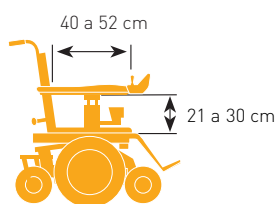

Desde 63 cm

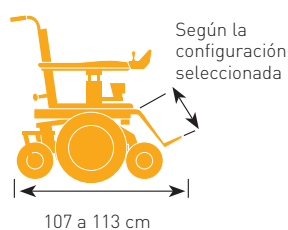

107 a 113 cm

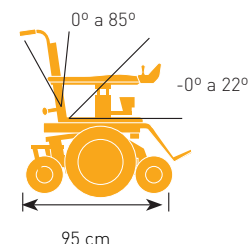

95 cm

JIVE UP			
Anchura de asiento:	40 a 50 cm (ajustable)	Peso máximo de usuario:	120 kg
Profundidad de asiento:	40 a 52 cm (ajustable)	Pendiente máxima:	10° (18%)
Altura de asiento:	46 cm / 48 cm	Superación de obstáculos:	Hasta 10 cm
Basculación eléctrica:	-10° a 22°	Velocidad:	6 km/h, 10 km/h, 13 km/h
Altura de respaldo:	57 cm (con respaldos Jay Comfort Std)	Baterías:	80 Amp (60 Amp opcionales)
Reclinación eléctrica:	0° a 85°	Radio de giro:	Desde 56 cm
Anchura total:	Desde 63 cm	Ruedas delanteras y traseras:	De 6" macizas
Longitud total:	107 a 113 cm	Ruedas centrales:	De 14" macizas o neumáticas
Posiciones de asiento en memoria:	Sentado, bipedestación, acostado, relax y transferencia	Color de carcasa:	Rojo, azul y blanco
		Color del chasis:	Negro (desde Enero 2017)

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones.



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es



Rev.1 Marzo 2017